

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt. ^{TS}

40311: Flammhemmende beschwerter Bettüberzug Anne-Lore® (Granulat)

Gewichtsartikel werden als beruhigendes Hilfsmittel bei Personen eingesetzt, die Stress- bzw. Angstsymptome haben, oder bei Personen mit Schlafstörungen.

Eine Gewichtsdecke beruhigt in dem gleichen Maße wie eine Umarmung. In Studien über die Verwendung von Gewichtsartikeln hat sich gezeigt, dass diese bei einigen Patienten den Bedarf an Fixiermitteln und Medikamenten reduzieren.

Ein mit Granulat gefüllter Gewichtsartikel folgt perfekt den Körperkonturen. Das Granulat hat zudem den Vorteil, dass nicht viel Füllvolumen benötigt wird, um genügend Druck auszuüben, sodass der Artikel selbst nicht wirklich dick sein muss. Dies ist in einer warmen Umgebung besonders praktisch und zudem pflegeleicht.



Md 40311/5^{TS}: Beschwerter Bettüberzug aus der Qualität 1010, mit Einsteckstreifen, Maße 140/200 cm, in den Wintermonaten kann eine Standard-Decke eingesetzt werden, 5 kg.

Md 40311/6^{TS}: Beschwerter Bettüberzug aus der Qualität 1010, Maße 140/200 cm, 6 kg.

Md 40311 K/3,1^{TS}: beschwerter Bettüberzug für Kinder in der Qualität 1010, mit Einsteckstreifen, Maße 120/150 cm, in den Wintermonaten kann eine Standard-Decke eingesetzt werden, 3,10 kg.

Md 40311 K/4,1^{TS}: beschwerter Bettüberzug für Kinder in der Qualität 1010, Maße 120/150 cm, 4,10 kg

Zweck:

- Angst und Stress abbauen
- Unruhe und Irritation zu lindern
- Verbesserung der Konzentration

Achtung:

- Der Einsatz einer Gewichtsdecke bei Patienten mit einer reduzierten Lungenkapazität oder einer schwachen Muskulatur kann ein Risiko darstellen. In diesem Fall ist die Nutzung der Decken genauestens zu verfolgen. Im Zweifelsfall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine Gewichtsdecke auf den Boden gefallen ist, gilt es immer, eine eventuelle Stolpergefahr zu berücksichtigen.

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt. ^{TS}

Richtlinien für die Verwendung:

Der beschwerte Bettbezug kann wie ein gewöhnlicher Standard-Bettbezug verwendet werden. Legen Sie den Einschlagstreifen auf der Rückseite unter die Matratze. Wenn der Raum ausreichend warm ist, kann er ohne zusätzliche Füllung verwendet werden. Bei kälteren Temperaturen können Sie eine normale Bettdecke einlegen.

Qualität: 1010, flammhemmendes, atmungsaktives Material, hohe Reißfestigkeit

Füllung: flammhemmendes Kunststoffgranulat

Die Gewichtsartikel sind aus einem flammhemmenden Material gefertigt.

Pflegehinweise für die Gewichtsartikel:

- 1. Waschen* Separat bei 60 °C mit wenig Waschmittel in einem Wäschebeutel im Schonwaschgang waschen. Decken mit einem Gewicht über 6 kg lassen sich teilen und können dann getrennt gewaschen werden.
- 2. Spülen* KEINEN WEICHSPÜLER verwenden.
- 3. Trocknen* Trocknen Sie sehr kurz bei niedriger Temperatur in einem Wäschebeutel im Trockner oder hängen Sie ihn zum Trocknen auf.
Nicht zusammen mit feuchtigkeitsspeichernden Textilien (z. B. Baumwolle,...) trocknen.