

Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.^{TS}

Verpleegdeken 40052^{TS}

Het verpleegdeken is een vriendelijke vorm van fixeren voor onrustige bewoners. Het is ideaal voor zowel gebruiker als verpleger/verzorger. Het geeft de gebruiker voldoende bewegingsvrijheid en vervangt onprettige fixatiemiddelen. Het voorkomt bovendien blootliggen en werkt preventief in hygiëne.

De bewoners kunnen d.m.v. de rits makkelijk verschoond worden terwijl ze in het deken zitten. Het materiaal is zeer sterk, heeft een hoge scheurweerstand en is brandvertragend. Het verpleegdeken kan beschouwd worden als een laken, dat overgaat in een jasje. Het wordt gesloten door een stevige rits die sluit naar het voeteinde toe.

Kwaliteit 1010 : Ademend, vochtwerend en brandvertragend textiel met hoge scheurweerstand.

Het is **VERPLICHT** om het verpleegdeken steeds samen te gebruiken met een bedhek.



Md 40052^{TS}

Matrasomvattend verpleegdeken, lange mouwen, hals met afscherming van de rits, 2 zijdelingse openingen met rits, rits vooraan, één maat.

Optie: *40082 : 10 cm extra hoogte

	S/M	L/XL	XXL
Borstomtrek	<85	85-125	>125

Wasvoorschrift van kwaliteit 1010 :

1. Wassen Separaat wassen op 60°C met weinig wasmiddel.
2. Spoelen GEEN WASVERZACHTER gebruiken.
3. Drogen Zeer kort op lage temperatuur in de droger of gewoon drogen.
Niet samen drogen met vochtvasthoudend textiel (zoals katoen,...).


Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.^{TS}



1. Plaats de onderste laag onder de matras en bevestig het bovendeel aan de onderste laag met de donker grijze ritsen.



2. Open de licht grijze rits vooraan en laat de patiënt op de matras zitten. Steek beide armen door de mouwen in het jasje en sluit de rits.

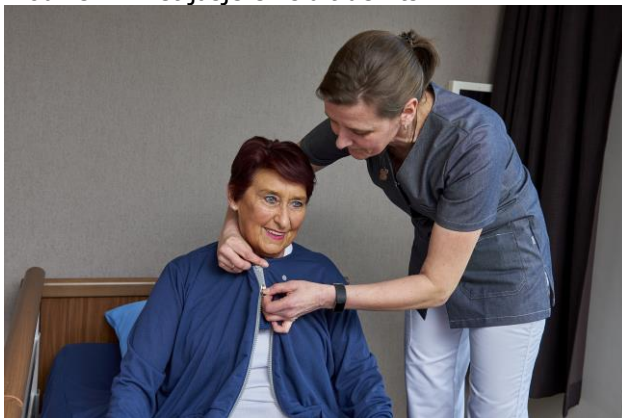

3. Sluit het afschermstrookje met de kunststof drukknoppen en breng de beddekken in hoge positie.

