

Artikel für die sensorische Stimulation

Artikel für die sensorische Stimulation werden eingesetzt, um das Körperbewusstsein und das Wissen um die eigene Existenz bei Patienten mit Demenz durch möglichst viele Sinnesreize zu bestätigen.



* Farben und Ausführungen können variieren (Bumerangkissen XS separat erhältlich **40640**)

Md 31832^{TS}

Erlebnisbezug für Bumerangkissen XS (md 40640), in Qualität 1060, waschbar, mit Gürtel, eingenähte Glöckchen und Knöpfe, Ring zur Befestigung persönlicher Gegenstände, Close-up®-Reißverschluss. (Kombinierbar mit Bumerangkissen XS **md 40640**).

Zweck: ➤ Taktile Stimulation.

Anwendungshinweise:

Legen Sie das Erlebniskissen auf die Oberschenkel und binden Sie den Gurt mit einem einfachen Knoten am Rücken des Benutzers fest.

Qualität: 1060, nicht brennbar, atmungsaktives Material, hohe Reißfestigkeit

Pflegehinweise für Stimulationsartikel:

1. Waschen Waschen bei 60 °C.
2. Trocknen Bei niedriger Temperatur im Trockner oder hängend trocknen.

