

Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.^{TS}

Verpleegdeken Md 40049^{TS}

Het verpleegdeken is een vriendelijke vorm van fixeren voor onrustige bewoners. Het is ideaal voor zowel gebruiker als verpleger/verzorger. Het geeft de gebruiker voldoende bewegingsvrijheid en vervangt onprettige fixatiemiddelen. Het voorkomt bovendien blootliggen en werkt preventief in hygiëne. De bewoners kunnen d.m.v. de rits makkelijk verschoond worden terwijl ze in het deken zitten. Het materiaal is zeer sterk, heeft een hoge scheurweerstand en is brandvertragend. Het verpleegdeken kan beschouwd worden als een laken, dat overgaat in een jasje. Het wordt gesloten door een stevige rits die sluit naar het voeteinde toe.

Kwaliteit 1010: Ademend, vochtwerend en brandvertragend textiel met hoge scheurweerstand.

Het is VERPLICHT om het verpleegdeken steeds samen te gebruiken met een bedhek.



Md 40049^{TS}

Matrasomvattend verpleegdeken, (donker grijze rits rond matras), 1 zijdelingse opening met rits (voor sondes, licht grijs), geen rits vooraan, rits van schouder tot aan de voeten (licht grijze rits), 6x riempje met gesp om het verpleegdeken vast te maken aan het bedframe (maat S/M, **L/XL**, XXL).

Optie: *40082: 10 cm extra hoogte

	S/M	L/XL	XXL
Borstomtrek	<85	85-125	>125

Wasvoorschrift van kwaliteit 1010:

1. Wassen Separaat wassen op 60°C met weinig wasmiddel.
2. Spoelen GEEN WASVERZACHTER gebruiken.
3. Drogen Zeer kort op lage temperatuur in de droger of gewoon drogen.
Niet samen drogen met vochtvasthoudend textiel (zoals katoen,...)

Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.^{TS}



1. Onderlaag aan bovendeeel vastmaken met 2 donkergrijze ritsen



2. De 6 grijze riempjes met metalen gesp vastmaken aan het bedframe.



3. Het verpleegdeken openen met de Lichtgrijze rits.



4. De patiënt in bed leggen en rechtse arm door het armsgat van het jasje steken.



5. Linkerarm van de patiënt door het armsgat steken en de lichtgrijze rits sluiten.

