

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon.^{TS}

Housse de soins Md 40049^{TS}

La housse de soins constitue une forme d'immobilisation douce pour les patients agités. Elle est idéale tant pour le patient que pour l'infirmier/le soignant. Elle offre une liberté de mouvement suffisante au patient et remplace les moyens d'immobilisation contraignants. Il permet non seulement une immobilisation, mais elle évite au patient de se découvrir et offre un effet préventif pour l'hygiène. Grâce à la fermeture à glissière, le patient peut être changé aisément pendant qu'il est assis dans son lit. Le matériau est très robuste, offre à un drap housse qui se prolonge par une chemise. Elle est fermée par une robuste fermeture à glissière qui se ferme en direction du pied au lit.

Qualité 1010 : textile respirant, hydrofuge et incombustible avec résistance élevée au déchirement.

Il est OBLIGATOIRE d'utiliser la housse de soins en combinaison d'une barrière de lit.



Md 40049^{TS}


Housse de soins, tout autour du matelas (fermeture éclair gris foncé autour du matelas), 2 fermetures de côté avec fermetures à glissière (pour sondes, gris pâle), pas de fermeture à glissière devant, fermeture de l'épaule gauche par le côté vers les pieds (fermeture gris pâle), 6x ruban avec boucle à englober le sommier du lit. (taille S/M, **L/XL**, XXL)

Option : *40082: 10 cm extra hauteur

	S/M	L/XL	XXL
Tour de poitrine	<85	85-125	>125

Prescription de lavage du qualité 1010:

1. *Lavage* Laver séparément à 60°C avec peu de lessive .
2. *Rinçage* NE PAS UTILISER D'ADOUCISSANT
3. *Séchage* Sécher brièvement à basse température dans le sèche-linge ou étendre pour sécher.
Ne pas sécher avec d'autres textiles hygroscopiques (comme le coton,...).

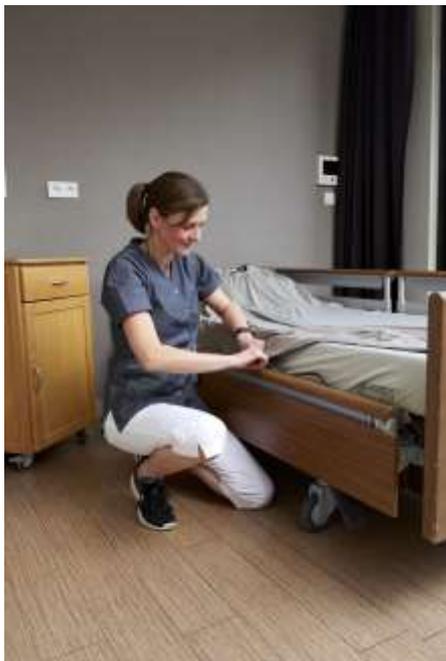


1. Fixer la sous-couche à la partie supérieure avec 2 fermetures éclair gris foncé.




2. Attachez les 6 sangles grises avec boucle métallique à la cadre de lit.



3. Ouvrez la housse de soins avec la fermeture à glissière gris clair.

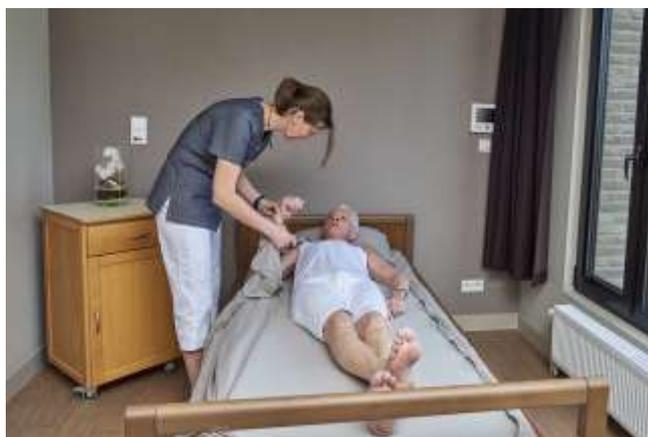

4. Mettez le patient au lit et le bras droit à travers l'emmanchure de la veste.

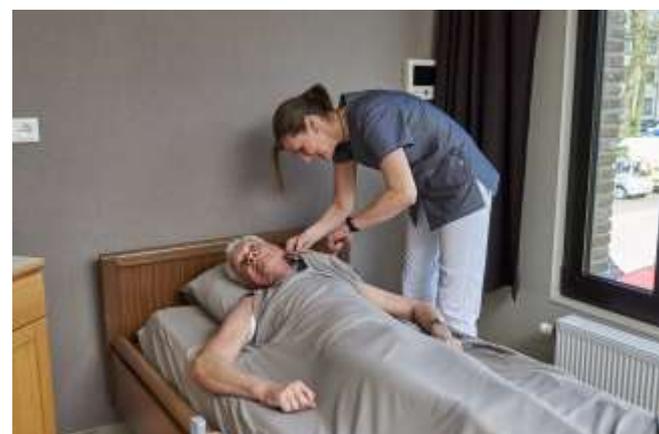

5. Mettez le bras gauche du patient à travers l'emmanchure et fermez la fermeture à glissière gris clair.

