

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon.^{TS}

Protection pour barrière de lit

La protection de barrière de lit sert à éviter que les patients agités ne se blessent avec cette dernière.

Qualité 1010: textile respirant, hydrofuge et incombustible avec résistance élevée au déchirement.



Md 4055 TS

La protection pour barrière de lit est installée sur la barrière à l'aide de sangles et se fixe sous le matelas, de sorte que le lit tout entier soit protégé. La barrière de lit peut être remontée ou abaissée sans qu'il ne faille enlever la protection. La toile est douce et très robuste. Le garnissage est ignifuge. Le matériau est totalement perméable à l'air et respirant. Il ne présente donc **aucun danger d'asphyxie**. Ce produit peut également être livré en exécutions spéciale. Il peut par exemple être pourvu d'orifices pour le passage de liens de contention ou autre...

Objet:

- Empêchez le patient de se blesser au niveau de la barrière latérale ou en insérant des membres à travers la barrière latérale ou entre la barrière latérale et le cadre du lit.
- Évitez de ramper sous la barrière.
- À utiliser pour les personnes mentalement confuses qui ne sont pas agressives.

Qualité : 1010, matériau incombustible, respirant, résistant à l'armoire de séchage.
Temps de séchage court à basse température.

Prescription de lavage de la qualité de tissu 1010 :

1. *Lavage* Laver séparément à 60°C avec peu de lessive.
2. *Rinçage* **NE PAS UTILISER D'ADOUCISSANT.**
3. *Séchage* Sécher brièvement à basse température dans le sèche-linge ou étendre le linge à plat. Ne pas sécher avec d'autres textiles hygroscopiques (comme le coton,...).

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon.^{TS}

