

Hilfsmittel für Pflegepersonal

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt. TS

Seitengitterpolster

Das Seitengitterpolster dient dem Schutz von unruhigen Bewohnern und soll vermeiden, dass sich diese am Seitengitter verletzen.

Qualität 1010: Atmungsaktives, feuchtigkeitsabweisendes und flammhemmendes Material mit hohem Reißwiderstand.





Md 40060 TS

Das Seitengitterpolster mit einem Schlitz in der Mitte (für 2 halbe Bettgeländer pro Seite) wird mit Schnallen über dem Seitengitter angebracht und darüber hinaus unter der Matratze befestigt, sodass das gesamte Bett geschützt ist. Das Seitengitter kann angehoben oder abgesenkt werden, ohne dass das Seitengitterpolster entfernt werden müsste. Der Stoff ist weich, sehr robust, flammhemmend mit einem hohem Reißwiderstand. Die Füllung ist ebenfalls flammhemmend. Das Material ist vollständig luftdurchlässig und atmungsaktiv. Es besteht somit keine Erstickungsgefahr.

Zweck:

- > Zum verhindern, dass sich der Pflegebedürftige am Bettgitter oder durch Einstecken von Gliedmaßen durch das Bettgitter oder zwischen Bettgitter und Bettrahmen verletzen kann.
- Zum verhindern, dass der Patient unter das Seitengitter kriecht.
- Zur Anwendung bei psychisch gestörten Personen, die nicht aggressiv sind.

Qualität: 1010, permanent flammhemmendes, atmungsaktives Material, Trockenschrankbeständig. Kurze Trocknungszeit bei niedriger Temperatur.

Pflegehinweise für die Qualität 1010:

1. Waschen Separat bei 60 °C mit wenig Waschmittel waschen.

2. Spülen KEINEN WEICHSPÜLER verwenden.

3. Trocknen Sehr kurz bei niedriger Temperatur im Trockner oder einfach an der Luft trocknen.

Nicht zusammen mit feuchtigkeitsabsorbierenden Textilien (z. B. Baumwolle etc.)





Hilfsmittel für Pflegepersonal

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt. TS





