

Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.<sup>TS</sup>

## Bedhekbeschermer

*De bedhekbeschermer wordt gebruikt om te vermijden dat onrustige bewoners zich verwonden aan het bedhek.*

*Kwaliteit 1010 : Ademend, vochtwerend en brandvertragend textiel met hoge scheurweerstand.*



### Md 40060 TS

De bedhekbeschermer met split in het midden (voor 2 halve bedhekken per zijde), wordt aangebracht over het bedhek d.m.v. gespen en bovendien onder de matras aan elkaar gezet, zodat het volledige bed afgeschermd is. Het bedhek kan omhoog of omlaag zonder dat de bedhekbeschermer verwijderd hoeft te worden. Het doek is zacht, zeer sterk, heeft een hoge scheurweerstand en is brandvertragend. Ook de vulling is brandvertragend. Het materiaal is volledig luchtdoorlatend en ademend. Er is dus geen verstikkingsgevaar.

#### Doel :

- Vermijden dat de patiënt zich verwondt aan het bedhek of door ledematen door het bedhek of tussen het bedhek en het bedframe te steken.
- Vermijden dat de patiënt onder het bedhek door kruipt.
- te gebruiken voor mentaal verwarde personen, die niet agressief zijn.

**Kwaliteit :** 1010, blijvend brandvertragend, ademend materiaal, droogkast bestendig. Korte droogtijd op lage temperatuur.

#### Wasvoorschrift van kwaliteit 1010 :

1. *Wassen* Separaat wassen op 60°C met weinig wasmiddel.
2. *Spoelen* GEEN WASVERZACHTER gebruiken.
3. *Drogen* Zeer kort op lage temperatuur in de droogkast of gewoon drogen. Niet samen drogen met vochtvasthoudend textiel (zoals katoen,...).

*Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.<sup>TM</sup>*

