

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon.^{TS}

Ceintures de maintien au siège

Ceintures de maintien destinées à éviter que les personnes ne glissent ou ne tombent d'un siège ou d'une chaise. Ces ceintures sont fabriquées dans un matériau agréable, lavable à 60°C et résistant au sèche-linge.

Qualité 1065: matériau respirant, hydrofuge, incombustible et anti-déchirant.



Md 31920^{TS}

Ceinture de maintien au siège bleu clair, empêche de glisser du siège, taille unique, fermeture au moyen d'une boucle de sécurité au dos du siège.



But:

- empêcher le patient de s'enfoncer dans le fauteuil roulant ou le siège de soins
- apporter un soutien afin que le patient puisse adopter une bonne posture assise
- accroître la sécurité des patients et prévenir les chutes en les immobilisant dans le fauteuil roulant ou le siège de soins.
- A utiliser pour les personnes mentalement confuses, qui ne sont pas agressives.

Qualité :

1065, matériau incombustible, respirant,
Lavable à 60°C et résistant au sèche-linge. Temps de séchage court à basse température.

Prescription de lavage des qualités 1010 et 1065 :

1. *Lavage* Laver séparément à 60°C avec peu de lessive.
2. *Rinçage* NE PAS UTILISER D'ADOUCISSANT.
3. *Séchage* Sécher brièvement à basse température dans le sèche-linge ou étendre le linge à plat.
Ne pas sécher avec d'autres textiles hygroscopiques (comme le coton,...).