

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon. ^{TS}

40380: Coussin lesté, incombustible pour les épaules Anne-Lore®

Les articles alourdis sont utilisés comme une aide à l'apaisement pour les personnes sujettes à des facteurs liés au stress et à l'anxiété.

Une couverture alourdie calme de la même manière qu'un câlin le ferait. Des études sur l'utilisation d'articles alourdis ont montré qu'ils réduisent la nécessité de recourir à la contention et aux médicaments chez certains patients.



Md 40380/2^{TS}: Coussin lesté, incombustible pour les épaules en qual. 1060 gris, 2 kg.

Objectif :

- Réduire l'anxiété et le stress
- Apaiser l'agitation et l'irritabilité
- Améliorer la concentration.

Attention :

- L'utilisation d'une couverture lestée peut présenter un risque en cas de capacité pulmonaire réduite ou de faiblesse musculaire. Dans ce cas, surveillez de près l'utilisation des couvertures. En cas de doute, consultez un médecin.
- Tenez compte du risque de trébuchement si une couverture lestée est tombée par terre.

Conseils d'utilisation :

Placez le coussin d'épaules sur les épaules, les coussinets rembourrés vers le bas.

Qualité : 1060, tissu ignifuge permanent, respirant, haute résistance à la déchirure

Rembourrage : granulés céramiques

Les articles lestés sont fabriqués dans un tissu ignifuge.

Ce coussin d'épaule lesté étant rembourré de granulés céramiques, il peut être préchauffé ou refroidi avant utilisation.

Prescription de lavage pour les articles alourdis :

1. Lavage Laver séparément à 60°C, programme doux avec peu de lessive et laver dans le sac à linge fourni. Les couettes plus de 6 kg sont divisibles et chaque partie peut être lavée séparément.
2. Rinçage NE PAS UTILISER D'ADOUCISSANT.
3. Séchage Etendre pour sécher. Pas de sèche-linge ni de nettoyage à sec.

