

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt.^{TS}

40380: Flammhemmendes beschwertes Schulterpolster Anne-Lore®

Gewichtsartikel werden als beruhigendes Hilfsmittel bei Personen eingesetzt, die Stress- bzw. Angstsymptome haben, oder bei Personen mit Schlafstörungen.

Eine Gewichtsdecke beruhigt in dem gleichen Maße wie eine Umarmung. In Studien über die Verwendung von Gewichtsartikeln hat sich gezeigt, dass diese bei einigen Patienten den Bedarf an Fixiermitteln und Medikamenten reduzieren.



Md 40380/2^{TS}: Beschwertes Schulterpolster in der Qualität 1060 Grau, 2 kg.

Zweck:

- Angst und Stress abbauen
- Unruhe und Irritation zu lindern
- Verbesserung der Konzentration

Achtung:

- Der Einsatz einer Gewichtsdecke bei Patienten mit einer reduzierten Lungenkapazität oder einer schwachen Muskulatur kann ein Risiko darstellen. In diesem Fall ist die Nutzung der Decken genauestens zu verfolgen. Im Zweifelsfall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine Gewichtsdecke auf den Boden gefallen ist, gilt es immer, eine eventuelle Stolpergefahr zu berücksichtigen.

Richtlinien für die Verwendung:

Legen Sie das Schulterkissen so auf die Schultern, dass die gepolsterten Kissen nach unten zeigen.

Qualität: 1060, flammhemmendes, atmungsaktives Material, hohe Reißfestigkeit
Füllung: Keramikgranulat

Die Gewichtsartikel sind aus einem flammhemmenden Material gefertigt.

Da dieses beschwerte Schulterkissen mit Keramikkörnern gefüllt ist, kann es vor der Verwendung vorgewärmt oder gekühlt werden.

Pflegehinweise für die Gewichtsartikel:

1. Waschen Separat bei 60 °C mit wenig Waschmittel in einem Wäschebeutel im Schonwaschgang waschen.
2. Spülen KEINEN WEICHSPÜLER verwenden.
3. Trocknen Trocknen Sie sehr kurz bei niedriger Temperatur in einem Wäschebeutel im Trockner oder hängen Sie ihn zum Trocknen auf.
Nicht zusammen mit feuchtigkeitsspeichernden Textilien (z. B. Baumwolle,...) trocknen.

