

Snoezle®

Snoezle® ist ein multisensorisches Erlebnis in Ihrer vertrauten Umgebung. Träumen Sie bei einer audio-visuellen Lichtshow.

Snoezelen ist eine Aktivität, die Menschen mit einer geistigen Behinderung, fortgeschrittener Demenz, Autismus, EVMB, anderen,... angeboten wird. Der Klient befindet sich für kurze oder längere Zeit in einem Raum, in dem gedämpfte Lichteffekte, Bilder und Geräusche eine anregende oder beruhigende Wirkung haben.

Das Snoezelen findet oft in einem Snoezelenraum statt. Snoezle® bringt das Snoezelerlebnis auf mobile Art und Weise in die gewohnte Umgebung des Benutzers.



Der gesamte Rand des Snoezle® ist mit 370 einzelnen LEDs ausgestattet, die zusammen eine Lichtshow erzeugen. Die LEDs sind durch eine Silikonhülle geschützt.

Diese Lichtshow ist vollständig mit dem Ton synchronisiert und kann je nach Thema angepasst werden.

Das Snoezlemodul, das Licht und Ton steuert, enthält 4 verschiedene Themen: Unterwasser, Wald, Meer und Weltraum. Jedes Thema gibt es in 2 Versionen: einen intensiven und einen ruhigen Modus.

Der intensive Modus ist ein anregenderer Modus. In diesem Modus gibt es etwas mehr Aktivität bei Licht und Ton. Der Ruhemodus ist entspannender und weniger anregend.

Das Einrichten eines Snoezle® besteht aus 3 Schritten und dauert nur 10 Sekunden.

1. Falten Sie den Snoezle® auf.
2. Befestigen Sie das Modul
3. Mit dem Netzkabel (oder der Batterie) verbinden

Ein Druck auf den Knopf und Sie sind bereit zum Snoezelen.

Der Snoezle® lässt sich zu einer flachen Scheibe zusammenfallen und leicht verstauen.

Die beste Art, Ihren Snoezle® zu reinigen, ist die Verwendung von Universal-Desinfektionstüchern. Für eine gründliche Reinigung kann der Stoff vom Zeltrahmen abgezogen werden. Der Stoff kann im Handwaschprogramm bei maximal 60°C gewaschen werden, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, zum Trocknen aufhängen.



Der Snoezle® ist für eine raue Zielgruppe gedacht und kann daher einiges aushalten. Das Zelt ist aus einem reißfesten Polyestergewebe gefertigt, das Soundmodul aus einem starken Kunststoff.

Snoezle® kann auf dem Boden oder auf dem Bett verwendet werden. Der Snoezle-Ständer für die Verwendung über einem Stuhl oder Rollstuhl ist separat erhältlich und höhenverstellbar.

Stimulations- und Gewichtsartikel



Unterwasser



Am Meer



Im Wald