

Snoezle®

Snoezle® is een multisensorische beleving in de eigen vertrouwde omgeving. Droom weg tijdens een audio-visuele lichtshow.

Snoezelen is een activiteit die aangeboden wordt aan mensen met een verstandelijke beperking, gevorderde dementie, autisme, EVMB, andere,... De cliënt wordt gedurende kortere of langere tijd in een ruimte geplaatst waar gedempte lichteffecten, beelden en geluiden een prikkelende of kalmerende invloed uitoefenen.

Snoezelen gebeurt vaak in een snoezelkamer. Snoezle® brengt de snoezelervaring op een mobiele manier tot bij de gebruiker, in zijn of haar vertrouwde omgeving.



De volledige rand van de Snoezle® is voorzien van 370 aparte leds die samen een lichtshow brengen. De leds zitten beschermd in een silicone sleeve.

Deze lichtshow is volledig gesynchroniseerd met de audio en op maat gemaakt per thema.

De Snoezlemodule die licht en geluid aanstuurt bevat 4 verschillende thema's: Onder water, Het bos, Aan zee en De ruimte. Elk thema bestaat in 2 versies: een intense en een rustige modus.

De intense modus is een meer prikkelende modus. In deze modus is er wat meer activiteit in licht en geluid. De rustige modus is meer relax, minder prikkelend.

Het opzetten van een Snoezle® bestaat uit 3 stappen en neemt slechts 10 seconden in beslag.

1. Vouw de Snoezle® open
2. Bevestig de module
3. Maak verbinding met de stroomkabel (of batterij)

Eén druk op de knop en er kan heerlijk gesnoezeld worden.



De Snoezle® kan samengevouwen worden tot een platte schijf en zo ook makkelijk opgeborgen worden. De beste manier om jou Snoezle® te reinigen is gebruik te maken van universele desinfectiedoekjes. Een grondige reiniging kan door het textiel los te ritsen van het tentframe. Het textiel kan gewassen worden in een handwas programma aan max 60°C, geen bleekmiddel, geen droogkast, hangend laten drogen.

De Snoezle® is gemaakt met het oog op een ruwe doelgroep en kan dus tegen een stootje. De tent is gemaakt uit een niet scheurend polyester textiel, de geluidsmodule uit een sterke kunststof.

De Snoezle® kan gebruikt worden op de grond of op het bed.

Het Snoezlestatief voor gebruik boven een zetel of rolstoel is apart verkrijgbaar en in hoogte regelbaar.

Belevings- en verzwaringsartikelen



Onder water

Aan zee



In het bos

