

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt.^{TS}

Stuhlgurt

Stuhlgurt zum Fixieren sitzender Personen, um ein Herabrutschen oder nach vorne Fallen aus Sessel oder Stuhl zu verhindern.

Der Gurt ist aus einem angenehmen Material gefertigt.

Qualität 1065: Atmungsaktives, feuchtigkeitsabweisendes und flammhemmendes reißfestes Material.



Md 31920 D^{TS}: Stuhlgurt mit zusätzlichem Close-up[®] Reißverschluss zur Befestigung einer Schoßdecke.

Md 31920 DC^{TS}: Schoßdecke aus Microfleece, Maße 80/85 cm, abnehmbar.

Md 31920 DB^{TS}: Schoßdecke aus Qualität 1010 Maße 80/85 cm, abnehmbar.

Zweck:

- verhindern, dass der Pflegebedürftige in den Rollstuhl oder Pflegesitz einsinkt
- unterstützen, damit der Pflegebedürftige eine gute Sitzhaltung einnehmen kann
- die Patientensicherheit zu erhöhen und den Patienten durch die Fixierung im Rollstuhl oder Pflegesitz vor Stürzen zu bewahren.
- Zur Verwendung bei geistig verwirrten Personen, die nicht aggressiv sind.

Qualität: 1065, permanent flammhemmendes, atmungsaktives Material, Waschbar bei 60°C und trocknergeeignet. Kurze Trocknungszeit bei niedriger Temperatur.

Pflegehinweise für die Qualitäten 1010 und 1065:

1. Waschen Separat bei 60 °C mit wenig Waschmittel waschen.
2. Spülen KEINEN WEICHPÜLER verwenden.
3. Trocknen Sehr kurz bei niedriger Temperatur im Trockner oder einfach an der Luft trocknen. Nicht zusammen mit feuchtigkeitsabsorbierenden Textilien (z. B. Baumwolle etc.) trocknen.