

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon.<sup>TS</sup>

## Ceintures de maintien au siège

*Ceintures de maintien destinées à éviter que les personnes ne glissent ou ne tombent d'un siège ou d'une chaise. Ces ceintures sont fabriquées dans un matériau agréable, lavable à 60°C et résistant au sèche-linge.*

*Qualité 1065: matériau respirant, hydrofuge, incombustible et anti-déchirant.*



### Md 31920 D<sup>TS</sup>

Ceinture de maintien au siège pourvue d'une fermeture à glissière pour attacher une couverture, taille unique, fermeture au moyen d'une boucle de sécurité au dos du siège.

**Md 31920 DC<sup>TS</sup>**: Couverture se fixant sur la ceinture de maintien. En microfleece, dimensions 80/85 cm.

**Md 31920 DB<sup>TS</sup>**: Couverture se fixant sur la ceinture de maintien. En qualité 1010, dimensions 85 cm.

#### But:

- empêcher le patient de s'enfoncer dans le fauteuil roulant ou le siège de soins
- apporter un soutien afin que le patient puisse adopter une bonne posture assise
- accroître la sécurité des patients et prévenir les chutes en les immobilisant dans le fauteuil roulant ou le siège de soins.
- A utiliser pour les personnes mentalement confuses, qui ne sont pas agressives.

**Qualité :** 1065, matériau incombustible, respirant,  
Lavable à 60°C et résistant au sèche-linge. Temps de séchage court à basse température.

#### Prescription de lavage des qualités 1010 et 1065 :

1. *Lavage* Laver séparément à 60°C avec peu de lessive.
2. *Rinçage* NE PAS UTILISER D'ADOUCISSANT.
3. *Séchage* Sécher brèvement à basse température dans le sèche-linge ou étendre le linge à plat.  
Ne pas sécher avec d'autres textiles hygroscopiques (comme le coton,...).

