

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon.^{TS}

Sac de couchage avec sangles de fixation 40075^{TS}

Le sac de couchage avec sangles de fixation donne à l'utilisateur une liberté de mouvement suffisante et remplace les fixations désagréables. Elle prévient également l'exposition et a un effet préventif sur l'hygiène. Les patients peuvent être facilement changés grâce à la fermeture éclair lorsqu'ils sont allongés dans le sac de couchage.

Qualité 1065: Matériau anti-déchirant respirant, hydrofuge et incombustible.

Il est OBLIGATOIRE d'utiliser le sac de couchage avec sangles de fixation en combinaison d'une barrière de lit.



Md 40075^{TS}

Sac de couchage sans manches, avec sangles de maintien pour serrures magnétiques aux épaules, à la taille et aux chevilles. Fermeture éclair de l'emmanchure droite à l'extrémité du pied gauche, fermeture velcro sur les épaules avec un œillet supplémentaire pour une fermeture magnétique, 2 ouvertures latérales à fermeture éclair, S/M, L/XL.

Prescription de lavage du qualité 1065:

1. *Lavage* Laver séparément à 60°C avec peu de lessive.
2. *Rinçage* NE PAS UTILISER D'ADOUCISSANT
3. *Séchage* Sécher brèvement à basse température dans le sèche-linge ou étendre pour sécher.
Ne pas sécher avec d'autres textiles hygroscopiques (comme le coton,...).

