

Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.<sup>TS</sup>

## Verpleegdeken Md 40050<sup>TS</sup>

Het verpleegdeken is een vriendelijke vorm van fixeren voor onrustige bewoners. Het is ideaal voor zowel gebruiker als verpleger/verzorger. Het geeft de gebruiker voldoende bewegingsvrijheid en vervangt onprettige fixatiemiddelen. Het voorkomt bovendien blootliggen en werkt preventief in hygiëne.

De bewoners kunnen d.m.v. de rits makkelijk verschoond worden terwijl ze in het deken zitten. Het materiaal is zeer sterk, heeft een hoge scheurweerstand en is brandvertragend. Het verpleegdeken kan beschouwd worden als een laken, dat overgaat in een jasje. Het wordt gesloten door een stevige rits die sluit naar het voeteinde toe.

Kwaliteit 1010 : Ademend, vochtwerend en brandvertragend textiel met hoge scheurweerstand.

Het is **VERPLICHT** om het verpleegdeken steeds samen te gebruiken met een bedhek.



### Md 40050<sup>TS</sup>

Verpleegdeken als hoelaken rond de matras, zonder mouwen, (maat S/M, **L/XL**, XXL), hals met afscherming van de rits, 2 zijdelingse openingen met rits, rits vooraan.

Optie: \*40050 B : rits op de schouders  
\*40050 ED : lange mouwen

	S/M	L/XL	XXL
<b>Borstomtrek</b>	<b>&lt;85</b>	<b>85-125</b>	<b>&gt;125</b>

#### Wasvoorschrift van kwaliteit 1010 :

1. *Wassen*      Separaat wassen op 60°C met weinig wasmiddel.
2. *Spoelen*      GEEN WASVERZACHTER gebruiken.
3. *Drogen*        Zeer kort op lage temperatuur in de droger of gewoon drogen.  
Niet samen drogen met vochtvasthoudend textiel (zoals katoen,...).

Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.<sup>TS</sup>



1. Breng het verpleegdeken aan rond de matras zoals een hoeslaken. Regel de lengte van de elastiek indien nodig met de elastiekklem.



2. Sluit de zijritsen en open het verpleegdeken van voeteneind naar de halsopening.



3. Laat de patiënt op de matras zitten, steek de armen door de armgaten in het jasje en sluit de rits. Sluit het afschermstroompje met de kunststof drukknoop en breng de beddekken in hoge positie.

