

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt. <sup>TS</sup>

### Md 40340 Flammhemmende Ruhedecke Anne-Lore® (Granulat)

*Gewichtsartikel werden als beruhigendes Hilfsmittel bei Personen eingesetzt, die Stress- bzw. Angstsymptome haben, oder bei Personen mit Schlafstörungen.*

*Eine Gewichtsdecke beruhigt in dem gleichen Maße wie eine Umarmung. In Studien über die Verwendung von Gewichtsartikeln hat sich gezeigt, dass diese bei einigen Patienten den Bedarf an Fixiermitteln und Medikamenten reduzieren.*

Ein mit Granulat gefüllter Gewichtsartikel folgt perfekt den Körperkonturen. Das Granulat hat zudem den Vorteil, dass nicht viel Füllvolumen benötigt wird, um genügend Druck auszuüben, sodass der Artikel selbst nicht wirklich dick sein muss. Dies ist in einer warmen Umgebung besonders praktisch und zudem pflegeleicht.



**Md 40340<sup>TS</sup>:** Ruhedecke in der Qualität 1010 wattiert, leicht beschwerte Seitenstreifen am Oberschenkel, an der Taille und Schulter, passt auf jeden Stuhl mit einer ausreichend hohen Rückenlehne.

#### Zweck:

- Angst und Stress abbauen
- Unruhe und Irritation zu lindern
- Verbesserung der Konzentration

#### Achtung:

- Der Einsatz einer Gewichtsdecke bei Patienten mit einer reduzierten Lungenkapazität oder einer schwachen Muskulatur kann ein Risiko darstellen. In diesem Fall ist die Nutzung der Decken genauestens zu verfolgen. Im Zweifelsfall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine Gewichtsdecke auf den Boden gefallen ist, gilt es immer, eine eventuelle Stolpergefahr zu berücksichtigen.

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt. <sup>TS</sup>

### Richtlinien für die Verwendung:

Legen Sie die Ruhedecke auf einen Sitz mit ausreichend hoher Rückenlehne. Legen Sie den unteren Gurt um die Rückenlehne und knapp oberhalb des Sitzes an, so dass der Gurt von vorne sichtbar ist. Ziehen Sie das obere Stück über die Oberkante der Rückenlehne, so dass die Ruhedecke straff über dem Sitz hängt. Legen Sie den oberen Gurt um die Rückenlehne, achten Sie aber darauf, dass der Gurt an der Vorderseite des Sitzes unter der Ruhedecke verläuft.

Klappen Sie die Seitenstreifen der Ruhedecke auf und lassen Sie den Benutzer auf dem Sitz Platz nehmen. Falten Sie die Seitenstreifen nacheinander über den Körper des Benutzers, beginnend bei den Beinen.


*Qualität:* 1010, flammhemmendes, atmungsaktives Material, hohe Reißfestigkeit

*Füllung:* flammhemmendes Kunststoffgranulat



## Stimulations- und Gewichtsartikel

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt. <sup>TS</sup>

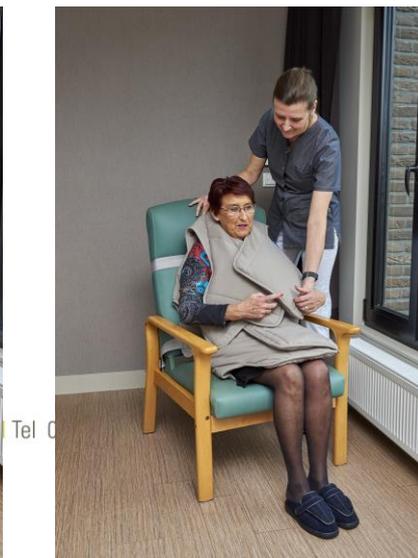

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt. <sup>TS</sup>

Die Gewichtsartikel sind aus einem flammhemmenden Material gefertigt.

Pflegehinweise für die Gewichtsartikel:

1. *Waschen* Separat bei 60 °C mit wenig Waschmittel in einem Wäschebeutel im Schonwaschgang waschen. Decken mit einem Gewicht über 6 kg lassen sich teilen und können dann getrennt gewaschen werden.
2. *Spülen* KEINEN WEICHSPÜLER verwenden.
3. *Trocknen* Trocknen Sie sehr kurz bei niedriger Temperatur in einem Wäschebeutel im Trockner oder hängen Sie ihn zum Trocknen auf.  
Nicht zusammen mit feuchtigkeitsspeichernden Textilien (z. B. Baumwolle,...) trocknen.

