

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt.^{TS}

Artikel für die sensorische Stimulation

Artikel für die sensorische Stimulation werden eingesetzt, um das Körperbewusstsein und das Wissen um die eigene Existenz bei Patienten mit Demenz durch möglichst viele Sinnesreize zu bestätigen.



Md 31843

Md 31843/3: Abwaschbarem PU-Gewichtsdecke, Dim. 65/85 cm, 3 kg, Druckknopfband auf der Innenseite.

Md 31843/5,5: Abwaschbarem PU-Gewichtsdecke, Dim. 65/85 cm, 5,5 kg, Druckknopfband auf der Innenseite.

(kombinierbar mit **31842** Erlebnis-Schoßdecke Bezug)

Ziel :

- Reduzieren von Angst und Stress
- Linderung von Unruhe und Reizbarkeit
- Verbesserung der Konzentration

Die PU-Gewichtsdecke ist als Hilfsmittel zum Abbau von Ängsten und Stress und zur Verbesserung der Konzentration durch Tiefendrucksimulation gedacht.

Richtlinie für die Verwendung:

Die Gewichtsdecke 31843 wird am besten in Kombination mit dem Erlebnisdeckenbezug [31842](#) verwendet.

Öffnen Sie den Reißverschluss der Bezug und drehen Sie sie um. Drücken Sie das Druckknopfband an den Seiten zusammen, so dass beide Teile aneinander hängen. Drehen Sie alles durch die Reißverschlussöffnung zurück und schließen Sie schließlich den Reißverschluss.

Legen Sie die gewichtete Erlebnisdecke auf die Oberschenkel und binden Sie den Gurt mit einem einfachen Knoten auf dem Rücken des Benutzers.

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt.^{TS}

Qualität: PU flammhemmend
1010, permanent flammhemmend, atmungsaktives Material, hohe Reißfestigkeit
Füllung: flammhemmendes Kunststoffgranulat

PU

1. Reinigung Kann mit warmer Seifenlauge bis 95°C gewaschen werden.
Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Bleichmittel.
Kann mit allen geeigneten Flüssigkeiten chemisch gereinigt werden, mit Ausnahme von Trichlorethylen.