

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon. ^{TS}

Articles d'expérience

Les articles d'expérience sont utilisés pour confirmer la conscience corporelle et l'existence de l'individu chez les personnes atteintes de démence en leur donnant autant de stimuli sensoriels que possible.



Md 31843

Md 31843/3: Couverture alourdie en PU, dim. 65/85 cm, 3 kg, ruban avec boutons pressions aux deux côtés.

Md 31843/5,5: Couverture alourdie en PU, dim. 65/85 cm, 5,5 kg, ruban avec boutons pressions aux deux côtés.

(combinable avec la housse de couverture **31842** expérience)

Objectif :

- Réduire l'anxiété et le stress
- Diminuer l'inquiétude et la susceptibilité
- Améliorer la concentration

La couverture lestée en PU est conçue comme une aide qui permet de réduire l'anxiété et le stress et d'améliorer la concentration par la simulation de pressions profondes.

Consignes d'utilisation:

La couverture lestée 31843 est utilisée de préférence en combinaison de la housse 31842. Ouvrez la fermeture à glissière de la housse de couette et retournez-la. Appuyez sur le ruban avec boutons pressions sur les côtés de sorte que les deux pièces pendent ensemble. Tournez tout à travers l'ouverture de fermeture à glissière et fermez finalement la fermeture. Placez la couverture sur les jambes et attachez la ceinture avec un nœud simple sur le dos du patient.

Qualité : PU ignifuge
1010, ignifuge, respirant, haute résistance contre la déchirure

Remplissage: granules en matière synthétique ignifuge

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon. ^{TS}

PU

1. *Nettoyage* Peut être nettoyé avec de l'eau chaude savonneuse jusqu'à 95°C.
N'utilisez pas de solvants ou d'agents blanchissant.
Peut être nettoyé chimiquement avec tous les liquides prévus avec exception de trichloréthylène.

