

Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt.^{TS}

40333: Flammhemmende abwaschbare Gewichtsdecke Anne-Lore® (Granulat)

Gewichtsartikel werden als beruhigendes Hilfsmittel bei Personen eingesetzt, die Stress- bzw. Angstsymptome haben, oder bei Personen mit Schlafstörungen.

Eine Gewichtsdecke beruhigt in dem gleichen Maße wie eine Umarmung. In Studien über die Verwendung von Gewichtsartikeln hat sich gezeigt, dass diese bei einigen Patienten den Bedarf an Fixiermitteln und Medikamenten reduzieren.

Ein mit Granulat gefüllter Gewichtsartikel folgt perfekt den Körperkonturen. Das Granulat hat zudem den Vorteil, dass nicht viel Füllvolumen benötigt wird, um genügend Druck auszuüben, sodass der Artikel selbst nicht wirklich dick sein muss. Dies ist in einer warmen Umgebung besonders praktisch und zudem pflegeleicht.



+ Md 610510 A ^{TS}

Md 40333/4^{TS}: Abwaschbare Gewichtsdecke aus PU, Maße 140/200 cm, 4 kg, Druckknopfband an den Seiten.

Md 40333/6^{TS}: Abwaschbare Gewichtsdecke aus PU, Maße 140/200 cm, 6 kg, Druckknopfband an den Seiten.

Md 40333/8^{TS}: Abwaschbare Gewichtsdecke aus PU, Maße 140/200 cm, 8 kg, Druckknopfband an den Seiten.

Md 40333/10^{TS}: Abwaschbare Gewichtsdecke aus PU, Maße 140/200 cm, 10 kg, Druckknopfband an den Seiten.

Md 40333/12^{TS}: Abwaschbare Gewichtsdecke aus PU, Maße 140/200 cm, 12 kg, Druckknopfband an den Seiten.

Md 610510 A ^{TS}: Bezug in der Qualität 1010, 140/200 cm, Close-up-Verschluss, Druckknopfband auf der Innenseite.

Zweck:

- Angst und Stress abbauen
- Unruhe und Irritation zu lindern
- Verbesserung der Konzentration



Unsere Modelle sind urheberrechtlich geschützt.^{TS}

Achtung:

- Der Einsatz einer Gewichtsdecke bei Patienten mit einer reduzierten Lungenkapazität oder einer schwachen Muskulatur kann ein Risiko darstellen. In diesem Fall ist die Nutzung der Decken genauestens zu verfolgen. Im Zweifelsfall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine Gewichtsdecke auf den Boden gefallen ist, gilt es immer, eine eventuelle Stolpergefahr zu berücksichtigen.

Richtlinien für die Verwendung:

Die Gewichtsdecke 40333 wird am besten in Kombination mit dem Bettbezug 610510 A verwendet. Öffnen Sie dazu den Reißverschluss des Bettbezugs und drehen Sie ihn auf links. Drücken Sie das Druckknopfband an den Seiten zusammen, so dass beide Teile zusammenhängen. Drehen Sie alles wieder durch die Reißverschlussöffnung und schließen Sie schließlich den Reißverschluss.



Qualität: PU, flammhemmend
Füllung: flammhemmendes Kunststoffgranulat

Die Gewichtsartikel sind aus einem flammhemmenden Material gefertigt.

Pflegehinweise für die Gewichtsartikel aus PU:

1. *Waschen* Mit lauwarmem Wasser mit Seife abwaschen oder desinfizieren. Keine Lösungsmittel, Bleich- oder Scheuermittel verwenden.