

La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon.^{TS}

Housse de soins 40051^{TS}

La housse de soins constitue une forme d'immobilisation douce pour les patients agités. Elle est idéale tant pour le patient que pour l'infirmier/le soignant. Elle offre une liberté de mouvement suffisante au patient et remplace les moyens d'immobilisation contraignants. Il permet non seulement une immobilisation, mais elle évite au patient de se découvrir et offre un effet préventif pour l'hygiène. Grâce à la fermeture à glissière, le patient peut être changé aisément pendant qu'il est assis dans son lit. Le matériau est très robuste, offre à un drap housse qui se prolonge par une chemise. Elle est fermée par une robuste fermeture à glissière qui se ferme en direction du pied au lit.

Qualité 1010 : textile respirant, hydrofuge et incombustible avec résistance élevée au déchirement.

Il est OBLIGATOIRE d'utiliser la housse de soins en combinaison d'une barrière de lit.



Md 40051^{TS}

Housse de soins, tout autour du matelas (fermeture à glissière gris foncé autour du matelas), sans manches, 2 fermetures à glissière gris pâle de côté (pour sondes), fermeture à glissière gris pâle devant avec protection au cou (taille S/M, L/XL, XXL).

Option : *40051 B: fermeture à glissière sur les épaules

*40082: 10 cm extra hauteur

*40051 PK: gilet en taille enfant

	S/M	L/XL	XXL
Tour de poitrine	<85	85-125	>125

Prescription de lavage du qualité 1010:

1. *Lavage* Laver séparément à 60°C avec peu de lessive .
2. *Rinçage* NE PAS UTILISER D' ADOUCISSANT
3. *Séchage* Sécher brièvement à basse température dans le sèche-linge ou étendre pour sécher.
Ne pas sécher avec d'autres textiles hygroscopiques (comme le coton,...).



La conception de nos modèles est protégée contre la contrefaçon.^{TS}



1. Placez la couche inférieure sous le matelas et attachez la partie supérieure à la couche inférieure avec les fermetures éclair gris foncé.



2. Ouvrez la fermeture éclair gris clair à l'avant et laissez le patient s'asseoir sur le matelas. Passez les deux bras dans les emmanchures de la veste et fermez la fermeture éclair de l'ouverture du cou vers les pieds.

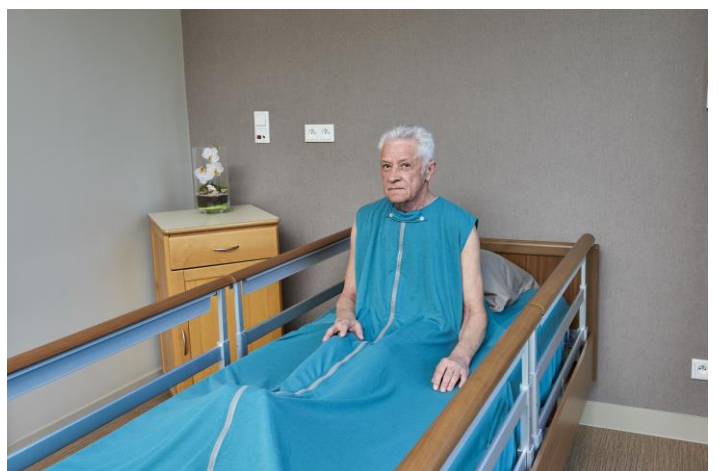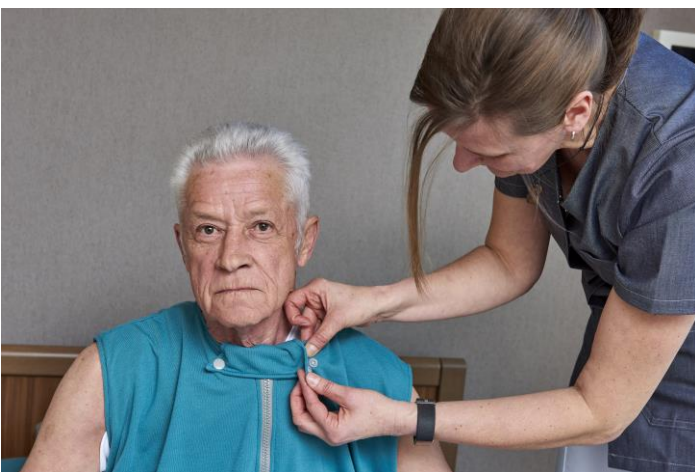

3. Fermez la bande de protection avec les boutons pression en plastique et mettez les barrières latérales en position haute.